


ANLEITUNG ZUR VERWENDUNG DER STECHHILFE MIT LANZETTE

Mit der Stechhilfe und der Lanzette können Sie leicht und praktisch schmerzfrei kapillares Blut aus Ihrer Fingerkuppe oder an anderen Körperstellen entnehmen.

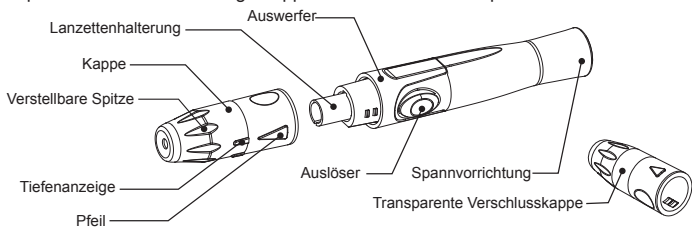

Warnhinweis!

Um das Risiko einer Infektion zu verringern:



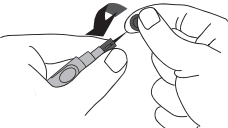
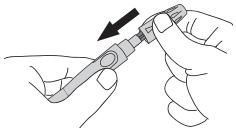
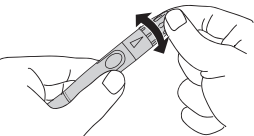
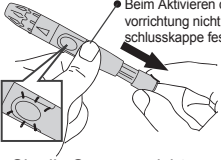
- ▶ Verwenden Sie Stechhilfe und Lanzetten nur an sich selbst und verwenden Sie niemals die Lanzetten oder Stechhilfen einer anderen Person.
- ▶ Verwenden Sie immer eine neue, sterile Lanzette. Lanzetten sind nur für den einmaligen Gebrauch bestimmt.
- ▶ Vermeiden Sie die Verschmutzung der Lanzetten und der Stechhilfe mit Handcreme oder Ölen.
- ▶ Die gebrauchte Stechhilfe stellt möglicherweise eine biologische Gefahr dar. Sie ist entsprechend den vor Ort geltenden Bestimmungen zu entsorgen.

Die Stechhilfe bietet 5 unterschiedliche Einstichtiefen:



Je länger die Anzeigelinie, desto tiefer ist der Einstich.


Einrichten der Stechhilfe mit Lanzette

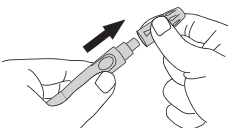-  Ziehen Sie die Verschlusskappe von der Stechhilfe ab.
-  Führen Sie eine Lanzette in die Lanzettenhalterung ein bis sie fest sitzt.
-  Drehen Sie die Schutzscheibe von der Lanzette ab.
-  Setzen Sie die Kappe wieder auf, so dass der Pfeil auf der Kappe mit dem Auslöser abschließt.
Beim Aktivieren der Spannvorrichtung nicht die Verschlusskappe festhalten!
-  Wählen Sie die Einstichtiefe, indem Sie die einstellbare Spitze in beide Richtungen drehen, bis der Pfeil auf der Kappe auf die gewünschte Tiefe zeigt.
-  Ziehen Sie die Spannvorrichtung zurück, bis Sie ein Klicken hören. Wenn die Stechhilfe bereit ist, sehen Sie innerhalb des Auslösers eine Farbänderung.
▶ Falls kein Klicken zu hören ist, wurde die Stechhilfe eventuell bereits beim Einführen der Lanzette gespannt.

Hinweis!


Vor der Entnahme eines Bluttröpfens:

- ▶ Waschen Sie Ihre Hände mit warmem Wasser und Seife und trocknen Sie sie gut ab, bevor Sie beginnen.
- ▶ Wählen Sie die Punktionsstelle entweder an der Fingerkuppe oder an einer anderen Körperstelle aus.
- ▶ Reiben Sie die Punktionsstelle circa 20 Sekunden lang, bevor Sie in die Haut einstechen.

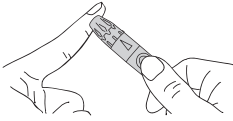

7. Einstechen am Finger

Drücken Sie den Vorderteil der Stechhilfe fest gegen die Seite Ihrer Fingerkuppe. Drücken Sie auf den Auslöser, um in Ihren Finger zu stechen; ein Klicken zeigt an, dass der Einstichvorgang abgeschlossen ist.

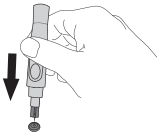

9. Nach der Messung entsorgen Sie die gebrauchte Lanzette in sicherer Weise, indem Sie die Schutzscheibe auf einer harten Oberfläche platzieren und die freiliegende Spitze in die Scheibe drücken.



8. Entfernen Sie das Gerät von der Punktionsstelle. Achten Sie darauf, die Blutprobe NICHT zu verschmieren. Halten Sie den Blutropfen an den im Messgerät steckenden Teststreifen. Das Blut wird in die Messöffnung des Teststreifens eingesaugt.



10. Entfernen Sie die Lanzette, indem Sie zuerst die Kappe abziehen. Schieben Sie dann den Auswerfer nach vorn, um die gebrauchte Lanzette zu entfernen. Entsorgen Sie die Lanzette entsprechend den vor Ort geltenden Bestimmungen.

Blutentnahme an alternativen Stellen (AST)



- ▶ **Verwenden Sie zur Entnahme von Blutproben an anderen Stellen als an der Fingerkuppe die transparente Verschlusskappe.**










Die Entnahme von Blut an anderen Stellen als an der Fingerkuppe wird als „AST“ (Alternative Site Testing, Blutentnahme an alternativen Stellen) bezeichnet. Ersetzen Sie die Kappe der Stechhilfe durch die transparente Verschlusskappe, um Blut an alternativen Stellen zu entnehmen. Ziehen Sie die Spannvorrichtung zurück, bis ein Klicken zu hören ist. Wenn Sie die Blutprobe am Unterarm, am Oberarm, an der Hand, am Oberschenkel oder an der Wade entnehmen, meiden Sie Bereiche mit sichtbaren Venen, um zu starke Blutungen zu vermeiden.

Reinigung

Die Lanzette ist eine Einwegvorrichtung und nur zur einmaligen Verwendung vorgesehen. Die Stechhilfe kann wiederverwendet werden. Wischen Sie die Stechhilfe zur Reinigung mit milder Seife und Wasser ab. Spülen Sie die Stechhilfe NICHT unter fließendem Wasser ab. Desinfizieren Sie die Kappe 10 Minuten lang in 70-prozentigem Alkohol und lassen Sie sie an der Luft trocknen. Legen Sie das Gerät NICHT in eine Spülmaschine und verwenden Sie keine Reinigungsmittel.

 **TAIDOC TECHNOLOGY CORPORATION**
B1-7F., No. 127, Wugong 2nd Road,
Wugu Dist., New Taipei City 248,
Taiwan (R.O.C.)
www.taidoc.com

Symbollegende

Symbol	Bedeutung
	Nicht wieder verwenden
	Gebrauchsanweisung beachten
	Zu verwenden bis
	Chargencode
	Hersteller
	Vorsicht, beachten Sie die beiliegenden Unterlagen
	Autorisierter Vertreter in der Europäischen Gemeinschaft
	Keimfrei durch Bestrahlung
	Bei beschädigter Verpackung nicht verwenden

Vertrieb: Aristo Pharma GmbH
Wallenroder Straße 8-10
13435 Berlin, Deutschland



MedNet GmbH
Borkstraße 10
48163 Münster, Deutschland

 **0123**  40012623/7