

## Lieber Gluco-test DUO Anwender:

Vielen Dank für Ihre Wahl unseres Gluco-test DUO Blutzuckermesssystems. Mit dem Gluco-test DUO haben Sie sich für ein benutzerfreundliches Blutzuckermesssystem entschieden, welches Ihnen auch die Möglichkeit bietet, Blutproben von alternativen Körperstellen (AST) zu gewinnen. Besondere Vorteile bietet auch die Teststreifen-Auswurf-Funktion sowie die Erinnerungsfunktion zum Einstellen definierter Messzeiten. Diese Kurzinformation soll Ihnen helfen, schnell mit Ihrem neuen Gluco-test DUO vertraut zu werden.

### Bestandteile zur Blutzuckermessung



Teststreifen-  
behälter (Dose)



Kontrolllösung




Teststreifen



Lanzetten



Klarsichtkappe  
für AST

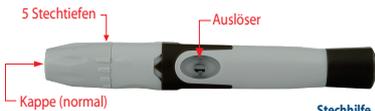

TAIDOC TECHNOLOGY CORPORATION  
B1-7F., No. 127, Wugong 2nd Road,  
Wugu Dist., New Taipei City 248, Taiwan (R.O.C.)  
[www.taidoc.com](http://www.taidoc.com)



MedNet GmbH  
Borkstraße 10  
48163 Münster, Deutschland

**Vertrieb:** Aristo Pharma GmbH  
Wallenroder Straße 8-10  
13435 Berlin, Deutschland



40126765

# Gluco-test DUO TD-4285

## STARTERSET ZUR BLUTZUCKERMESSUNG

*In-vitro*-Diagnostikum zur Eigenanwendung



## Schnellanleitung

# 1. Messung des Blutzuckers

- 1 Waschen Sie sich Ihre Hände gründlich und trocknen Sie diese sorgfältig ab. Entnehmen Sie einen Teststreifen aus der Teststreifendose und verschließen Sie diese dann fest.
- 2 Führen Sie den Teststreifen in das Gerät ein. Das Gerät ist eingeschaltet.
- 3 Das Gluco-test DUO Blutzuckermessgerät darf nur mit Gluco-test DUO Teststreifen verwendet werden.
- 4 Wenn  in der Anzeige blinkt, lassen Sie bitte Ihr Blut an der Aufnahmeöffnung des Teststreifens einsaugen, bis die Messung selbstständig beginnt.
- 5 Das Ergebnis Ihrer Blutzuckermessung wird angezeigt, nachdem das Messgerät bis auf 0 zurückgezählt hat. Der Messwert wird automatisch im Messgerät gespeichert.
- 6 Entfernen Sie den Teststreifen durch Betätigen des Streifen-auswurfschiebers (vorn oben) oder direkt durch Ziehen mit der Hand. Das Gerät schaltet sich dann automatisch ab. Bitte entsorgen Sie Lanzetten und Teststreifen gemäß den geltenden Vorschriften.

# 2. Anzeigen des Ergebnisses

Ihr Ergebnis wird folgendermaßen angezeigt.

Lo / low  /  / high  / KETONE? / Hi

<b>Lo</b>	<b>low</b> 	
erscheint, wenn Ihr Ergebnis unterhalb der Messgrenze von < 20 mg/dl (1,1 mmol/l) liegt	erscheint, wenn Ihr Ergebnis zwischen 20 - 69 mg/dl (1,1 - 3,8 mmol/l) liegt	erscheint, wenn Ihr Ergebnis im Normbereich 70 - 129 mg/dl (3,8 - 7,1 mmol/l) liegt
<b>high</b> 	<b>KETONE?</b>	<b>Hi</b>
erscheint, wenn Ihr Ergebnis bei 130 - 239 mg/dl (7,2 - 13,2 mmol/l) und mehr liegt	erscheint zusammen mit <b>high</b>  , wenn der Wert 240 mg/dl (13,3 mmol/l) und mehr beträgt	wird angezeigt, wenn Ihr Ergebnis einen Wert von > 600 mg/dl (33,3 mmol/l) übersteigt

## Warnung:

“Lo” oder “low ” Symbol zeigt Hypoglykämie (niedriger Blutzucker) an. Sie sollten unverzüglich ärztliche Hilfe in Anspruch nehmen.

“Hi”, “high ” oder “KETONE?” Symbol zeigt Hyperglykämie (hoher Blutzucker) an. Sie sollten unverzüglich ärztliche Hilfe in Anspruch nehmen.