

Einfache Blutzuckermessung

Gluco-test[®] DUO TD-4285



in mmol/L



in mg/dL

Sofort messen –
keine Codierung erforderlich

- Nur 0,5 µl Blut
- Nur 8 Sekunden Messzeit
- Maximales Display
- Handlich und Zuverlässig



1 Mit sauberen Händen einen Teststreifen aus der Teststreifendose entnehmen.



2 Den Teststreifen in das Gerät einführen. *Das Gerät schaltet automatisch ein.*



3 Wenn  in der Anzeige blinkt, das Blut an der Aufnahmeöffnung des Teststreifens einsaugen lassen. *Die Messung startet.*



4 Das Ergebnis wird sofort angezeigt. *Ihr Blutzuckerwert wird automatisch abgespeichert.*



5 Den Teststreifen einfach durch Betätigen des Streifenauwurfschiebers (vorn oben) entfernen. *Das Gerät schaltet sich automatisch ab.*